



Regelschmerz-Pflaster

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

SOS Regelschmerz-Pflaster lindern mit ihrer angenehmen und gut verträglichen Wärme krampfartige Regelschmerzen. Sie enthalten eine Mischung aus Aktivkohle und Eisenpulver, die sich bei Kontakt mit Sauerstoff langsam erwärmt. Die Pflaster spenden bis zu 12 Stunden sanfte, natürliche und gleichmäßige Wärme.

Die Regelschmerz-Pflaster werden im Bereich des Unterleibs und/oder unteren Rückenbereichs von außen auf die Kleidung bzw. die Unterwäsche aufgeklebt.

Die wohltuende Wirkung von Wärme:
Wärme ist eine bewährte Methode bei Krämpfen und Schmerzen.

Langzeit- und Tiefenwärme besitzen die Eigenschaft, verkrampte Muskeln zu entspannen. Bei Menstruationsbeschwerden kann die Wärme die Symptome, wie zum Beispiel Schmerzen und Verkrampfungen im Bereich des Unterleibs und des unteren Rückenbereichs, lindern.

Anwendung

- Das Sachet mit dem Regelschmerz-Pflaster von Hand öffnen (nicht einschneiden) und das Wärme-Pflaster entnehmen. Das Wärme-Pflaster wird von der Luft aktiviert. Daher das Sachet erst öffnen, wenn das Wärme-Pflaster benutzt werden soll.
- Die Schutzfolie vorsichtig entfernen.
- Das Wärme-Pflaster mit der Klebeseite auf die Kleidung oder Unterwäsche über die schmerzende Stelle des Unterleibs oder des unteren Rückenbereichs aufkleben.

- Das Wärme-Pflaster wärmt sich langsam auf und erreicht innerhalb von ungefähr 30 Minuten seine Höchsttemperatur. Das Wärme-Pflaster spendet bis zu 12 Stunden wohltuende, sanfte und gleichmäßige Wärme.

Warnhinweis:

Bei falscher Anwendung kann das Regelschmerz-Pflaster auch bei niedriger Temperatur zu Brandwunden führen.

Beachten Sie daher vor der Anwendung die Anwendungshinweise und bewahren Sie den Beipackzettel zum späteren Nachlesen auf. Überwachen Sie die Anwendung regelmäßig.

Damit kein Risiko einer Bildung von Brandwunden entsteht: Das Regelschmerz-Pflaster niemals direkt auf die Haut, sondern immer von außen auf Unterwäsche oder Kleidung aufbringen! Ermöglichen Sie die Luftzirkulation über dem Wärme-Pflaster und wenden Sie keinen Druck an, beispielsweise indem Sie auf dem Wärme-Pflaster liegen oder einen engen Gürtel tragen. Verwenden Sie das Wärme-Pflaster nicht auf sehr dünnem Stoff (z. B. Strumpfhosen oder Spitzenunterwäsche), bei denen die Haut in direkten Kontakt mit dem Pflaster kommen könnte. Falls das Wärme-Pflaster unangenehm heiß wird oder sich ein Hautausschlag bildet, ist die Anwendung sofort zu beenden.

Die Anwendung des Regelschmerz-Pflasters sollte bei Personen, die das Produkt nicht selbstständig entfernen können, wie beispielsweise körperbehinderte Personen, nur mit einer sorgfältigen Überwachung erfolgen.

Das Wärme-Pflaster ist ausschließlich im Bereich des Unterleibs oder im unteren Rückenbereich anzuwenden und nur zur äußerlichen Anwendung vorgesehen.



Bitte wenden Sie sich vor Anwendung dieses Produkts an Ihren Arzt oder Apotheker, falls Sie an schlechter Durchblutung, an Diabetes, an Nervenschäden, einer Erkrankung der Sinnesfunktion, an einer Hauterkrankung, an Rheumatoïdarthritis leiden oder schwanger sind.

Wärme-Pflaster darf nicht angewendet werden:

bei Kindern; während des Schlafes; über einer geröteten Stelle oder über wunder oder entzündeter Haut; in Verbindung mit Cremes, einzureibenden Mitteln oder Lotionen, die auf die Haut aufgetragen werden; in Verbindung mit bzw. in der Nähe von anderen Wärmequellen; bei Personen mit einer Neigung zu allergischen Reaktionen auf Medikamente oder Kosmetika.

Wärme-Pflaster darf nicht:

verbrannt, geknetet, zerschnitten oder eingegrissen werden; in der Mikrowelle erwärmt oder ein sonstiger Versuch unternommen werden, das Wärme-Pflaster wieder aufzuwärmen; mit Wasser oder anderer Flüssigkeit in Kontakt kommen. Nicht auf dünnen oder empfindlichen Stoffen anwenden, da der Klebstoff Schäden verursachen könnte.

Bitte beachten Sie:

Das Wärme-Pflaster ist nur zur indirekten Anwendung (nicht direkt auf die Haut aufbringen) bei Regelschmerzen vorgesehen. Es ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Lagerung/Verfalldatum:

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
An einem kühlen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.
Bis zu dem auf dem Sachet angegebenen Verfalldatum aufbrauchen.


Inhaltsstoffe des Wärme-Pflasters:
Eisen, Aktivkohle, Wasser

Entsorgung:
im normalen Hausmüll entsorgen.

Die Inhaltsstoffe können schädlich sein, wenn sie verschluckt werden oder in direkten Kontakt mit der Haut oder den Augen gelangen: beim Verschlucken der Inhaltsstoffe den Mund mit Wasser ausspülen. Bei direktem Kontakt der Inhaltsstoffe mit der Haut oder den Augen sofort mit Wasser ab- bzw. ausspülen. In beiden Fällen sollte unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt werden.

Inhalt: 2 Wärme-Pflaster

Vertrieb:
DISTRICON GmbH
Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim

Hersteller:
Dr. Kleine Pharma GmbH
Opalstraße 1
D-33739 Bielefeld  0086

Stand der Information: 2015.02 REV 01

Für Experten-Video
QR-Code scannen:



SOS unterstützt die:

