

120mm



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

D MEDIZINPRODUKT AUGENTROPFEN EUPHRASIA AUGENTROST UND KAMILLE

VISIOMAX Augentropfen mit den natürlichen Extrakten von Augentrost (Euphrasia) und Kamille eignen sich insbesondere zur Linderung und Beruhigung von gereizten und angegriffenen Augen. VISIOMAX Augentropfen mit Augentrost und Kamille bewirken eine Linderung bei Beschwerden, insbesondere in Zusammenhang mit belastenden Umwelteinflüssen, lang andauernder Bildschirmarbeit, dem Aufenthalt in verrauchten Räumen oder dem Tragen von Kontaktlinsen. **Auch für Träger von Kontaktlinsen geeignet.**

Zusammensetzung

Isotonische Lösung mit Augentrost (Euphrasia), Kamille, HPMC 0,25 %

Anwendung

Vor Gebrauch Hände sorgfältig waschen und trocknen. Ampulle durch Drehen am oberen Ende der Ampulle öffnen. Produkt unmittelbar nach dem Öffnen verwenden. Zwei Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und kurz blinzeln. Darauf achten, dass das Auge nicht mit der Ampulle in Berührung kommt.

Packungsgröße: 15 x 0,4 ml, Einzeldosis-Ampullen

Warnhinweise

Produkt enthält keine Konservierungsstoffe. Um einer mikrobiellen Verschmutzung vorzubeugen, geöffnete Ampulle sofort verwenden und nach Gebrauch entsorgen. Nicht wiederverwenden. Produkt nicht anwenden, falls die Ampulle beschädigt ist. Um Verunreinigungen zu verhindern, Tropföffnung nicht berühren. Auge nicht mit der Ampulle berühren, um Verletzungen oder Augeninfektionen zu vermeiden. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit/Allergien gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Bei anhaltenden Beschwerden oder Auftreten von Unverträglichkeiten einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen. Verwendung von Augenmedikamenten mit dem Augenarzt abstimmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht einnehmen. Lichtgeschützt im Originalkarton bei Zimmertemperatur lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht zum Aufbewahren von Kontaktlinsen geeignet.

Lagerung

Lichtgeschützt im Originalkarton bei Zimmertemperatur aufbewahren.

120mm

120mm

dm Markenqualität

eyelike GmbH, Ringstraße 12, DE-63543 Neuberg

Hergestellt in der EU

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
 Am dm-Platz 1
 DE-76227 Karlsruhe
 Tel. 0800 3658633
 www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
 dm-drogerie markt
 AT-5071 Wals
 Tel. 0800 3658633
 www.dm.at

CE 0482

Stand der Information: 23.04.2020

Gebrauchsinformation
beachten.Nicht
wiederverwenden.Chargennummer sowie
Verfallsdatum befinden
sich auf der Ampulle und
der Faltschachtel-
unterseite.Nicht verwenden bei
beschädigter Packung.**STERILE A**Steriles Produkt
durch aseptische
Filtration.Informationsbeilage
beachten.

Hersteller

120mm