

Gebrauchsanweisung

EAN 4006671036115

Scholl Druckstellen Pflaster extra weich

Scholl Druckstellen Pflaster extra weich hilft bei der Schmerzlinderung durch Reduzierung von Druck und Scheuern.

- Dermatologisch getesteter Klebstoff
- Kann auf jeden Teil des Fußes zugeschnitten werden
- Kann auch an Schuhen angebracht werden, um Fersen, Zehen usw. zu schützen und ist besonders nützlich für Sportschuhe. Für enger anliegende Schuhe empfehlen wir Scholl Druckstellen Pflaster Kurotex.

Anwendung: Auf sauberer und trockener Haut anwenden, täglich Pflaster wechseln. Pflaster auf die gewünschte Größe zuschneiden und das Trägerpapier abziehen. Aufkleben und fest andrücken.

Hinweise: Nur äußerlich anwenden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Enthält Latex, nicht anwenden bei Latexallergie. Nicht auf entzündeter oder verletzter Haut anwenden. Bei Beschwerden, Reizungen oder Überempfindlichkeit Anwendung abbrechen und Pflaster entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Nicht zu fest anziehen, nicht um Zehen oder Fuß binden. Kühl und trocken ohne direkte Sonneneinwirkung aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung Beschädigt ist.