

Verwendungshinweise

1. Bürsten Sie Ihre Prothese z. B. mit der Dontodent Prothesenbürste oder einer weichen Zahnbürste kurz unter klarem Wasser ab. 2. Geben Sie eine Tablette zusammen mit Ihrem Zahnersatz z. B. in die Dontodent Reinigungsbad-Dose oder in ein Glas und füllen Sie dieses mit warmem Wasser (35 °C), bis der Zahnersatz vollständig bedeckt ist. Kein kochendes Wasser verwenden, da dieses die Prothese beschädigen kann. Nach 15 Minuten ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen, auch wenn sich die Tablette nicht vollständig aufgelöst hat. 3. Spülen Sie Ihren Zahnersatz gründlich mit klarem Wasser ab. Leeren Sie das Reinigungsbehältnis und spülen Sie es aus.