

Multi-Gyn® Vaginaldusche



BITTE LESEN SIE VOR JEDER ANWENDUNG DER MULTI-GYN VAGINALDUSCHE UND DER MULTI-GYN BRAUSETABLETTEN DIESES INFORMATIONSBLATT SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES AUF

MULTI-GYN VAGINALDUSCHE - FÜR EINE OPTIMALE VAGINALHYGIENE

- Spült effizient und schonend
- Das Spezialventil verhindert sowohl das Zurückfließen der Spüllösung als auch einen zu starken Druck in der Vagina und ermöglicht so einen sanften Spüleffekt
- Das ergonomische Design ermöglicht die Nutzung in verschiedenen Positionen

ANWENDUNG

- Allgemeine Vaginalhygiene
- Intensive Vaginalhygiene im Falle von außergewöhnlich starkem oder unangenehm riechendem Ausfluss, Juckreiz, Reizungen oder Brennen

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Manche Frauen sind anfälliger für vaginale Beschwerden als andere aufgrund des Lebensstils, der sexuellen Aktivität oder ihrer Menstruation. Abhängig von der persönlichen Intimhygiene kann die Multi-Gyn Vaginaldusche auch häufiger verwendet werden. Es wird jedoch nicht empfohlen, die Multi-Gyn Vaginaldusche häufiger als drei Mal pro Woche anzuwenden, es sei denn Ihr Arzt hat es Ihnen anders verschrieben. Im Falle von dauerhaften Beschwerden kontaktieren Sie bitte immer Ihren Arzt.


Die Multi-Gyn Vaginaldusche kann in verschiedenen Positionen verwendet werden. Finden Sie die für Sie bequemste Position. Wichtig dabei ist, dass die Duschflüssigkeit ungehindert abfließen kann. Daher empfiehlt sich z.B. die Anwendung unter der Dusche oder auf der Toilette sitzend. Bitte beachten Sie die illustrierte Gebrauchsanweisung der Multi-Gyn Vaginaldusche unten.

MULTI-GYN VAGINALDUSCHE WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT

Möchten Sie schwanger werden, sollten Sie von einer Anwendung der Multi-Gyn Vaginaldusche bis drei Tage nach dem Geschlechtsverkehr absehen. Die Multi-Gyn Vaginaldusche kann jedoch nicht als Verhütungsmittel verwendet werden. Für die Multi-Gyn Vaginaldusche und die Multi-Gyn Brausetabletten sind keine Gegenanzeigen während der Schwangerschaft oder Stillzeit bekannt. Allerdings ist es grundsätzlich sehr empfehlenswert, sich im Falle einer Schwangerschaft mit einem Arzt zu beraten.

VORSICHT!

Die Multi-Gyn Vaginaldusche sollte niemals in heißem bzw. kochendem Wasser ausgekocht werden oder in heißes Wasser gelegt werden, da sie sich sonst verformen kann.

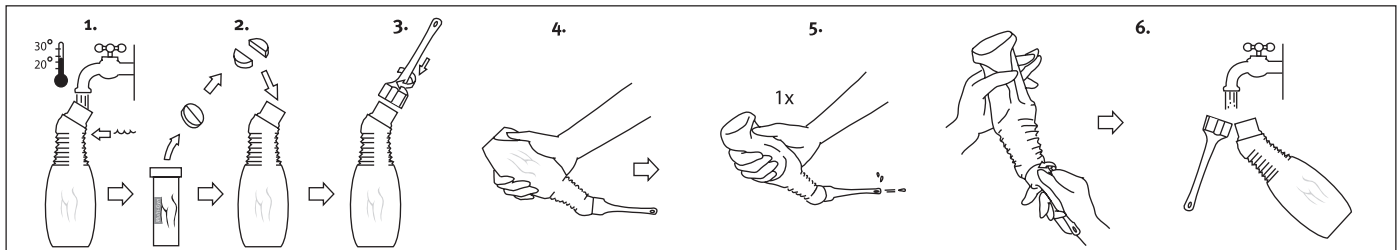

1. Füllen Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche bis zum oberen Ende der gerippten Fläche mit lauwarmem Wasser.
2. Brechen Sie eine Multi-Gyn Brausetablette in zwei Hälften und lösen Sie diese in der Flasche auf.
3. Schrauben Sie den Applikator auf die Flasche und warten Sie, bis sich die Brausetablette vollständig aufgelöst hat und nicht mehr sprudelt.

4. Führen Sie den Applikator vorsichtig in die Scheide ein.
5. Drücken Sie die Flasche sanft, um die Vagina mit der Spüllösung zu reinigen. Die Flasche wird dabei nicht vollständig entleert.*

6. Spülen Sie die Multi-Gyn Vaginaldusche und den Applikator nach Gebrauch mit sauberem, warmem Wasser kurz aus und lassen Sie die Teile an der Luft trocknen.

*Die Flüssigkeitsmenge, die in die Vagina gelangt, reicht für eine Spülung aus. Wenn Sie mit der verbleibenden Flüssigkeit die Vagina dennoch weiterspülen möchten, schrauben Sie den Applikator ab, so dass die Flasche wieder ihre ursprüngliche Form bekommen kann und beginnen Sie bei Schritt 4.

Multi-Gyn® Brausetabletten

MULTI-GYN BRAUSETABLETTEN ZUR HERSTELLUNG EINER MILDEN SPÜLLÖSUNG FÜR OPTIMALE VAGINALHYGIENE

- Eine Tablette ist ausreichend für eine Flasche Vaginalspüllösung
- Enthalten natürliche Inhaltsstoffe und sind frei von Duftstoffen
- Zur Verwendung mit der Multi-Gyn Vaginaldusche für eine optimale Vaginalhygiene

MILDE TABLETTEN MIT NATÜRLICHEN INHALTSSTOFFEN ZUR HERSTELLUNG EINER VAGINALSPÜLLÖSUNG

Mit den Multi-Gyn Brausetabletten und lauwarmem Wasser können Sie eine milde Vaginalspüllösung herstellen, die ideal mit der Multi-Gyn Vaginaldusche anwendbar ist. Das Konzentrat der Brausetablette enthält natürliche Inhaltsstoffe und ist frei von Konservierungsstoffen.

INGREDIENTS

Lactose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ascorbic Acid.

Hauptbestandteil 2QR-Komplex Pulver:

Patentierter Inhaltsstoff extrahiert aus der Aloe Barbadensis.

Die Oberfläche der Tabletten ist körnig und kann farblich leicht unterschiedlich sein. Dies liegt am natürlichen Ursprung des Hauptinhaltsstoffes, dem 2QR-Komplex und hat keinerlei Einfluss auf die Sicherheit oder Wirksamkeit des Produktes.

LAGERUNG

Nicht in Reichweite von Kindern lagern. Bewahren Sie die Multi-Gyn Brausetabletten in der Originalverpackung an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C (Zimmertemperatur) auf.

PZN Deutschland: 14060721
PZN Österreich: 3856084

BioClin BV, Blaak 555
3011 GB Rotterdam, Niederlande