

dm
DAS
gesunde
PLUS

Medizinprodukt
Augentropfen
mit Natriumhyaluronat (0,15 %)

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Das gesunde Plus Augentropfen sind ein steriles konservierungsmittelfreies Produkt und bilden einen viskoelastischen, klaren Schutzfilm auf der Hornhaut. Sie bestehen ausschließlich aus natürlichen biologischen Substanzen.

Das gesunde Plus Augentropfen schützen und befeuchten die Augenoberfläche und machen sie gleitfähig.

Dadurch bewirken sie lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden im Zusammenhang mit

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge,
- Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch,
- Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

Anwendungsgebiet:

Augentropfen zum Schutz, zur Befeuchtung und Gleitfähigkeit der Augenoberfläche.

Dosierungsanleitung und Anwendung: Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis vom Riegel ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Geben Sie ein oder zwei Tropfen in jedes Auge oder auf die Innenseite der Kontaktlinse. Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt!

Zusammensetzung: Natriumhyaluronat (0,15 %), Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natrium-dihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

Packungsgröße: Ein-Dosis-Behältnisse, 15 x 0,35 ml

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.
- Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt mit der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **Das gesunde Plus Augentropfen** keine Konservierungsmittel enthalten, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge eintropfen.
- Nicht an infizierten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie **Das gesunde Plus Augentropfen** nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.
- **Das gesunde Plus Augentropfen** enthalten Phosphatpuffer. Bei langfristiger Anwendung und bei Funktionsstörungen der Hornhaut kann die Anwendung von **Das gesunde Plus Augentropfen** zu Ausfällungen von Kalziumsalzen in der Hornhaut führen.

Használati útmutató

Orvostechnikai eszköz

Műkönyy

nátrium-hialuronáttal (0,15 %)

Kedves Felhasználó!

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz arról, hogy a műkönyy használata esetén mire kell odafigyelnie! Amennyiben kérdése van, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!

A **Das gesunde Plus műkönyy** steril, tartósítószermentes, viszkó-elasztikus, egy szintelen védőréteget képez a szaruhártyán. Kizárólag természetes, biológiai összetevőkből áll.

A **Das gesunde Plus műkönyy** védi, nedvesíti és csúszóssá teszi a szemfelületet. Hosszantartó könnyebbséget biztosít az alábbi panaszok esetén:

- Mechanikai igénybevétel esetén, pl. kemény vagy puha kontaktlencse viselése, diagnosztikai beavatkozások esetén.
- Környezeti hatások okozta igénybevétel esetén, pl. légkondicionáló berendezések, szél, hideg, szárazság, légszennyezés vagy cigarettafüst
- A látás túlzott igénybevétele esetén, pl. tartós munkavégzés számítógépes képernyő vagy mikroszkóp előtt, hosszabb autózetés.

Használat: Válasszon le egy ampullát, bizonyosodjon meg róla, hogy a csomagolása nem sérült-e. Lecsavarással (nem letépéssel) nyissa fel az ampulla lapos végét. Cseppentsen 1 vagy 2 cseppet mindkét szemébe vagy a kontaktlencse belső felületére.

Ha hosszabb ideig fennálló problémát észlel, forduljon szemorvosához!

Összetétel: Nátrium-hialuronát (0,15 %), nátrium-klorid, nátrium-monohidrogén-foszfát, nátrium-dihidrogén-foszfát, tisztított víz.

Csomagolás mérete: egyenként csomagolt, 15 x 0,35 ml-es kiszerelés

Elővigyázatossági intézkedések és figyelmeztetés:

- Ne használja a sérült ampulla tartalmát.
- A szem ne érintkezzen az ampullával.
- Fertőzésveszély miatt kerülje az ampulla nyílásának megérintését.
- A készítményt bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén ne alkalmazza.
- A **Das gesunde Plus műkönyy** egyszeri felhasználásra készült; ne használja fel a megmaradt oldatot, mivel az nem tartalmaz tartósítószeret.
- Ne csepegtesse szemébe más gyógyászati szemcseppekkel együtt.
- Fertőzött szem esetén ne alkalmazza.
- Használat után átmenetileg csökkenhet a látóképesség, ebben az esetben ne vezessen járművet, ne dolgozzon gépekkel, és várja meg amíg visszatér a normális látóképessége.
- A lejárati idő letelte után a műkönyvet ne használja. A lejárati időt a doboz tetején illetve minden ampullán is olvashatja.
- A **Das gesunde Plus műkönyy** foszfátpuffert tartalmaz. Tartós használat, valamint a szaruhártya működési zavarai esetén a kalciumsó kicsapódásához vezethet.

Sonstige Hinweise: / Egyéb megjegyzések:

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. / 2 °C–25 °C között tárolandó.

Vor Frost schützen. / Fagytól védve tárolandó!



Chargennummer / Verfallsdatum ist auf dem Ein-Dosis-Behältnis und der Faltschachtel-
unterseite aufgeprägt. / Gyártási szám / A felhasználhatósági időt ld. az adagolón és a doboz alsó részén



aseptische Herstellung /
aszéptikus gyártási technológia



Gebrauchsanweisung beachten /
tartsa be a használati útmutató előírásait



Nicht zur Wiederverwendung /
csak egyszeri használatra



Lagerungstemperatur /
tárolási hőmérséklet



bei beschädigter
Verpackung nicht
verwenden /
Ha sérült a
csomagolás,
ne használja a
műkönyvet.



Hersteller: / Gyártó: Dr. Kleine Pharma GmbH, Opalstraße 1, D-33739 Bielefeld

Hergestellt für: / Gyártatja: Vitalia Vertriebs GmbH, Beethovenstraße 1a, D 97080 Würzburg

Vertrieb in Deutschland:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhe

Forgalmazza: dm Kft., 2046 Törökbalint, Depo Pf. 4.

CE 0481

Stand der Information: / Az információ dátuma: 12.2016



0800 3658633



- Papier aus 100 %
Recycling-Material
- Papier recyclebar