

ANWENDUNG:

1. Zahnersatz abspülen. Eine Tablette zusammen mit dem Zahnersatz in ein Glas geben.
2. Röhrchen mit der Verschlusskappe wieder fest verschließen.
3. Reinigungsbehältnis mit warmem Wasser füllen, so dass der Zahnersatz vollständig bedeckt ist. KEIN KOCHENDES WASSER VERWENDEN. ZU HEISSES WASSER KANN IHRE PROTHESE BESCHÄDIGEN.
4. 15 Minuten einwirken lassen. Nach 15 Minuten ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen, auch wenn sich die Tablette nicht vollständig aufgelöst hat.
5. Zahnersatz vor dem Einsetzen abbürsten und unter klarem Wasser gründlich abspülen.
6. Reinigungsbehältnis leeren und ausspülen.

Rev. 10, 08/2020