

## **Compeed Blasenpflaster Mixpack**

Die COMPEED® Hydrokolloid-Technologie sorgt für sofortige Schmerzlinderung und eine schnelle Wundheilung.

1. Die starke Polsterung lindert den Druck und schützt vor schmerzhafter Reibung.
2. Dank seiner sicher haftenden, abgeschrägten Kanten gibt COMPEED® bei Bewegung nach, sodass es tagelang nicht verrutscht.
3. Die transparenten Ränder passen sich der Haut an.
4. Das wasserdichte, atmungsaktive Design unterstützt das feuchte Wundmilieu und schützt vor Keimen. Dadurch werden optimale Bedingungen für eine schnellere natürliche Wundheilung geschaffen.

Die Haut vor der Anwendung säubern und trocknen. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Pflasters. Design für Erwachsene. Bei Diabetes vor der Benutzung mit dem Arzt Rücksprache halten.

### **ANWENDUNG:**

1. Die Haut vor der Anwendung säubern und trocknen. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, muss die Hautstelle rund um die Blase frei von Creme- und Fettrückständen sein.
2. Zuerst das obere Schutzpapier entfernen, dann das untere, ohne die Klebefläche zu berühren.
3. Das Pflaster direkt auf die Blase kleben und die Ränder sorgfältig glattstreichen.
4. Das Pflaster erst entfernen, wenn es beginnt sich von selbst zu lösen (Bitte beachten: Pflaster kann problemlos mehrere Tage haften bleiben).
5. Zur Entfernung das Pflaster langsam entlang der Haut dehnen.

### **WARNUNGEN:**

- Bei Diabetes vor der Benutzung mit dem Arzt Rücksprache halten.
- Nicht bei infizierten Wunden anwenden.
- Benutztes Pflaster nicht wiederverwenden, um Infektionen zu vermeiden.
- Wenn sich die Blase verschlimmert oder nicht heilt einen Arzt konsultieren, bevor sportliche Aktivitäten fortgesetzt werden.
- COMPEED® Pflaster niemals zurechtschneiden.
- Eventuelle Kleberückstände können leicht mit Waschbenzin entfernt werden, Anweisungen des Textilherstellers beachten.