

Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam lesen!

# EMCUR® HERPESPFLASTER

mit Hyaluronsäure



## WAS IST EMCUR® HERPESPFLASTER?

**Zweckbestimmung:** Das Emcur® Herpespflaster ist ein Medizinprodukt zur Unterstützung der Wundheilung bei Lippenherpes.

Das Emcur® Herpespflaster ist sehr dünn, transparent und haftet selbständig an der Lippe. Das Pflaster enthält Hyaluronsäure, um die betroffenen Stellen zu befeuchten. Es lindert den Juckreiz, bildet einen Schutzfilm gegen äußere Einflüsse und reduziert das Risiko von Neuinfektionen.

Die Pflaster wirken bis zu 12 Stunden, sind transparent und können einfach überschminkt werden.

## WAS IST HERPES LABIALIS (LIPPENHERPES)?

Herpes labialis ist eine Infektion mit Herpes simplex-Viren, die sich in Form von mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen an der Lippe äußert.

Erste Symptome sind ein Wärmegefühl, ein Kribbeln und eine Rötung der betroffenen Hautpartien an der Lippe. Innerhalb von Stunden bilden sich mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen um die Mundpartie.

Lippenherpes kann durch ein geschwächtes Immunsystem, Fieber, Menstruation, Stress, intensive Sonneneinstrahlung oder als Reaktion auf bestimmte Lebensmittel ausgelöst werden. Lippenherpes kann immer wieder auftreten, sobald das Virus im Körper ist. Durch die oben aufgeführten Gründe können die Viren reaktiviert werden. Wenn Sie von Lippenherpes betroffen sind, vermeiden Sie Lippenkontakt mit anderen Personen bis die Bläschen komplett verschwunden sind. Lippenherpes ist hochansteckend. Vermeiden Sie sehr heiße oder sehr kalte Lebensmittel, da diese den Herpes verschlimmern können.

## ANWENDUNG

Waschen Sie Ihre Hände bevor Sie das Pflaster verwenden. Stellen Sie sicher, dass die betroffene Hautpartie sauber und trocken ist. Entnehmen Sie ein Pflaster aus der Packung, öffnen Sie die Hülle und ziehen Sie den Applikator mit Daumen und Zeigefinger aus der Hülle. Achten Sie dabei darauf, den Applikator an der gegenüberliegenden Seite des Pflasters zu greifen, um das Pflaster dabei nicht zu berühren.

Platzieren Sie zunächst die erste Hälfte des Pflasters und kleben Sie im nächsten Schritt das komplette Pflaster auf eine betroffene Stelle auf. Gegebenenfalls können Sie auf dem Pflaster problemlos Make-up und Lippenstift anwenden.

Wiederholen Sie die Anwendung bis der Herpes komplett verschwunden ist. Jedes Pflaster bitte nur einmal verwenden.



## WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Kann allergische Reaktionen auslösen.

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde ihres Landes zu melden.

## PACKUNGSGRÖSSE

15 Pflaster

Weitere Informationen finden Sie auf: [www.emcur.com](http://www.emcur.com)

## ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE/LAGERUNGSHINWEISE



Medizinprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



Nur für den Einmalgebrauch



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Trocken aufbewahren

## Stand der Information: Juni 2023

### VERTRIEB:

Emcur GmbH, Mainzer Str. 1 c, DE-56130 Bad Ems - [service@emcur.com](mailto:service@emcur.com)

Mehr Informationen unter: [www.emcur.com](http://www.emcur.com)

 Eurosirel SpA, Viale Europa, 30, Cusago IT-20047, Milano

 CFUA304438

L214DE100 5343311DA